



Vörulisti

Convatec stómavörur

**Convatec stómavörur fást í Lyfju, Stuðlabergi,
Akureyrarapóteki og öðrum apótekum.**



Velkommen til Convatecs produktkatalog for stomisystemer, tilbehør og plejeprodukter

Hos Convatec er vi på en rejse mod **Forever Caring**

Det er vores løfte at give patienter og sundhedsudbydere den støtte, de har brug for.

Med det nye løfte følger en ny, mere menneskelig identitet. Fra vores varme nye farvepalette til lagene af omsorg, der omfavner patienten i vores logo, sætter vi mennesker i centrum af alt, hvad vi gør.



Du vil i vores katalog kunne finde information omkring Convatecs produkter og let finde frem til de produkter, som passer præcis til din patient.

Kontakt vores kundeservice på **tlf. 48 16 74 75** eller skriv til os på **Convatec.danmark@Convatec.com** for råd og vejledning, samt vareprøver.

Vi hjælper dig gerne med at finde den bedste løsning for din patient.



Indholdsfortegnelse

me+	6
Vejledning i vores produkter	8
Esteem™ + 1-dels bandager	20
Esteem™ + 1-dels Urostomi	24
Esteem® Flex Konveks	24
Esteem® Soft Konveks	28
IleoDress Plus®	30
Stomadress®, 1-dels cap	30
IriDress® 1-dels Irrigationbandage	30
Natura® hudplader	32
Natura® 2-dels bandager med ringkobling	34
Natura® + Kolostomiposer	40
Natura® + Ileostomiposer	42
Natura® Urostomiposer	44
Esteem Synergy® ⊕ 2-dels løsninger	46
Esteem Synergy® 2-dels bandager med klæbekobling	48
Bornesortiment	52
Tilbehør	54
Referencer	63

Sammen kan vi hjælpe dine patienter med at skabe en sund relation til deres stomi.

Convatecs hudvenlige og sikre posesystemer styrker dine patienter med tryghed til at gå ud, leve livet og forbinde med andre. Ud over at levere en omfattende portefølje af stomiproduktløsninger, er vi forpligtet til at løfte oplevelsen af at leve med en stomi gennem vores me+™-program, som giver dine patienter den uddannelse, støtte og ressourcer, de har brug for.

Fordi, når din patient har en sund relation til deres stomi, har de en sund relation til livet.

DER ER BEHOV FOR KONTINUERLIG PATIENTSTØTTE

De mest almindelige udfordringer hos personer med stomi er relateret til lækage, hudproblemer, hyppighed af skift og svært ved at tage sig af deres stomi¹

Efter en interaktion med en me+™-sygeplejerske:

98% af undersøgelsens respondenter sagde, at de ville anbefale denne service²

90% af de adspurgte sagde, at de undgik et ekstra besøg på et sundhedscenter²

For sundhedsprofessionelle

For at tilmelde dine patienter i me+™-programmet, ring til os på **48 16 74 75** eller email: convatec.danmark@convatec.com

ME+™ PROGRAMMET STØTTER PATIENTER

Me+™-programmet er et omfattende støtteprogram udviklet til at supplere klinisk pleje ved at give patienterne støtte, inspiration, indsigt og ideer gennem hele deres stomirejse.

medlemmer af me+™-programmet kan:

- ✓ Anmode om gratis vareprøver på stomiprodukter
- ✓ Tale med en me+™-sygeplejerske eller stomispecialist
- ✓ Få adgang til onlineresourcer, uddannelse og guidede træningsvideoer

me+

Vores mål er at samarbejde med dig og dine patienter til at levere klassens bedste pleje hele vejen igennem patientrejsen:

Præ-operativt / Operation

- ✓ Få adgang til onlineresourcer på convatec.dk
- ✓ Anmod om me+™ Starterkit (toilettaske med indhold)
- ✓ Tilmeld me+-programmet
- ✓ Lær om me+ recovery-serien, udviklet til at hjælpe med genoptræning efter operation


Det første år og derefter

- ✓ Udforsk online ressourcer og værktøjer
- ✓ Bliv inspireret af me+-fællesskabet
- ✓ Prove nye produkter
- ✓ Fortsætte med me+ recovery øvelser*

Under hele deres rejse kan dine patienter ringe på **48 16 74 75** for rådgivning fra me+™-sygeplejersker og stomispecialister

Ugerne umiddelbart efter operation

- ✓ Rådfør dig med vores me+-sygeplejersker og stomispecialister
- ✓ me+ velkomstmail og support
- ✓ me+ recovery fase¹ øvelseshæfte

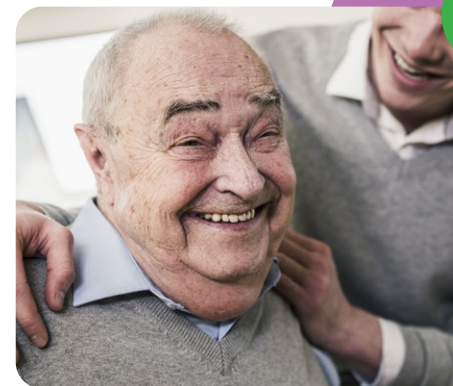

me+

En me+™-sygeplejerske kan hjælpe sundhedspersonale med:

- ✓ Personlig support
- ✓ Tilmelding af dine patienter til me+™-programmet
- ✓ Sende et me+ Starter Kit og gratis vareprøver på stomiprodukter til dine patienter

* Oplysningerne i serien er ikke beregnet til at give medicinsk rådgivning. Patienter og brugere bør tale med deres sundhedspersonale, for de engagerer sig i fysisk aktivitet efter stomioperation. I tilfælde af at de oplever smerte eller ubehag, bør de stoppe aktiviteten øjeblikkeligt og kontakte deres sundhedspersonale.

EN INTRODUKTION TIL stomipleje

Der er 3 primære typer af stomioperationer. Forståelsen af de grundlæggende forskelle er vigtig for at vælge det rigtige produkt og levere den rigtige støtte.



Kolostomi (tyktarm)

En kolostomi er et kirurgisk indgreb, der skaber en åbning på maven, hvorigennem tyktarmen omdirigeres til at omgå syge eller beskadigede dele af tyktarmen. Tyktarmen bringes til overfladen af huden og sys til maven for at danne en ny udgang for afføringen fra tarmen.

Ting du skal vide om en kolostomi

- ✓ Primært anlagt på grund af colon- eller rektal cancer eller traumer
- ✓ Kan være midlertidig eller permanent
- ✓ Afføring har tendens til at være semiformet til fast og forudsigelig 1-2 gange om dagen

Ileostomi (tyndtarm)

En ileostomi er et kirurgisk indgreb, der skaber en åbning på maven, hvorigennem enden af tyndtarmen omdirigeres til at omgå syge eller beskadigede dele af fordøjelsessystemet. Tyndtarmen bringes til overfladen af huden, og sys til maven for at danne en ny udgang for afføringen fra tarmen.

Ting du skal vide om en ileostomi

- ✓ Primært anlagt på grund af inflammatorisk tarmsygdom (Crohns, colitis ulcerosa)
- ✓ Kan være midlertidig eller permanent
- ✓ Afføring er flydende eller pastaagtig og konstant i løbet af dagen
- ✓ Tyndtarmen indeholder fordøjelses-enzymmer og -syrer, og output kan derfor forårsage hudirritation, hvis det kommer i kontakt med huden

Urostomi (urinveje)

En urostomi er et kirurgisk indgreb, der skaber en åbning på underlivet, hvorigennem urinen ledes væk fra en blære, der er beskadiget eller syg. Efter blæren fjernes, bliver et stykke tyndtarm (ileum) adskilt fra resten af tarmen. Dette stykke bruges som en ledning for urin til at passere ud af kroppen. Urinlederne er fastgjort til denne nye gang, og den ene ende bringes op til en åbning lavet på maven.

Ting du skal vide om en urostomi

- ✓ Primært dannet på grund af kræft eller betændelse i blæren
- ✓ Er altid permanent
- ✓ Urin strømmer gennem stomien, som den er produceret, hvilket betyder, at output er konstant
- ✓ Urin kan forårsage hudirritation, hvis den kommer i kontakt med huden

AT VÆLGE DET RIGTIGE stomisystem

Stomiposen samler output fra stomien. Posen kommer som en del af et 2-delt eller 1-delt system.



2-delt system

Det 2-delte system inkluderer en hudplade og en separat pose, der kobles sikkert sammen. Denne mulighed gør det muligt at fjerne posen, tomme eller ændre på den, uden at fjerne hudpladen lige så ofte.

Anbefalet til personer

- ✓ som ønsker at skifte deres pose oftere end deres hudplade
- ✓ med en ileostomi, hvor posen skal tommes/skiftes ofte der træner, rejser og dyrker sport



1-delt system

Hudpladen og posen leveres som en integreret løsning som ikke kan adskilles. Det betyder ét enkelt og bekvemt trin til påsætning eller fjernelse, hvilket giver en frisk start hver gang. Denne mulighed er tynd og fleksibel og designet til mere hyppige skift.

Anbefalet til personer

- ✓ postoperativt - forebygger pres på abdomen forårsaget når hudplade og pose skal kobles sammen
- ✓ som foretrækker at skifte stomisystem ofte
- ✓ som foretrækker et fleksibelt stomisystem med lav profil



EN VEJLEDNING TIL hudklæbere

Klæberen er en vigtig komponent af hudpladen. Vores produktportefolje indeholder en række klæbemiddel-teknologier der gør dig i stand til at vælge en passende løsning, der opfylder dine patienters behov.



Stomahesive® (standard brugstid)

Vores unikke Stomahesive®-teknologi er designet til personer med stort set fast output, og er et hydrokolloid klæbemiddel, der skånsomt klæber til huden og beskytter den mod de skadelige virkninger af stomioutput.

I nogle af vores produkter tilbyder vi også en Modificeret Stomahesive®-mulighed, som har et strejf af mineralolie, der gør barrieren mere fleksibel under brug og fjernelse lettere på huden.

Anbefales til personer:

- ✓ med semi-formet/formet output
- ✓ der har følsom hud
- ✓ med hyppige skift
- ✓ som foretrækker en standardbrugstid

Durahesive® (forlænget brug)

Designet til personer med flydende output. Vores unikke Durahesive®-teknologi er et hydrokolloid klæbemiddel, der svulmer op ved hydrering for at beskytte stomien. Denne specielle effekt kaldet rullekrave-effekten, hjælper ved at skabe en mere sikker forsegling uden at skade huden.

Anbefales til personer:

- ✓ med semi-flydende/flydende output, inklusive urin
- ✓ der ønsker eller har brug for længere brugstid

ESTEEM™+ Soft & Flex konveks

Klæbemiddel udviklet med en høj initial klæbeevne (tack) for at hjælpe med den indledende vedhæftning til huden. Den hydrokolloide barriere har en tynd kant for at forhindre kanten at sidde fast i tøjet, og et tykkere center til at hjælpe absorption omkring stomien.⁴


Anbefales til personer:

- ✓ med både fast og flydende output
- ✓ som foretrækker en standardbrugstid

TAPE KANT findes i to versioner:

Akryl: Tape kant med god klæbeevne
Hydrokolloid: Udviklet til dem med følsomhed over for andre tape kanter

Klæbemidlernes funktion

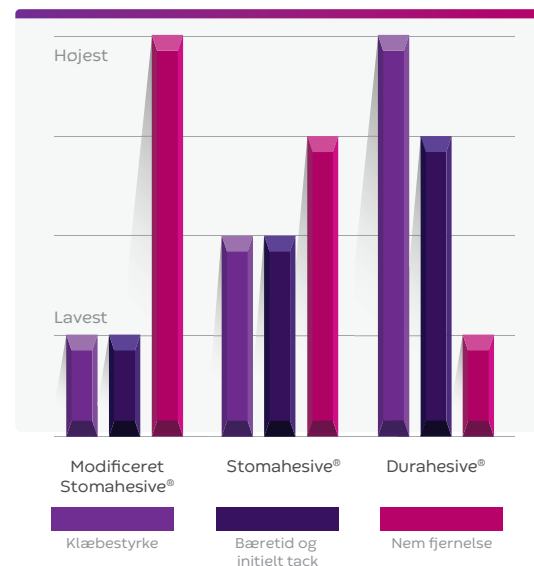

Klæbemiddel guide

Klæber-type	Formet afforing	Semi-formet afforing	Semi-flydende afforing	Flydende afforing	Urin	System	
Durahesive®		✓	✓	✓	✓	1-dels og 2-dels	Forlænget brug
Esteem™+ Flex/Soft konveks	✓	✓	✓	✓	✓	Kun 1-dels	
Stomahesive®	✓	✓	✓	✓		1-dels og 2-dels	Standard brugstid
Modificeret Stomahesive®	✓	✓				Kun 1-dels	

Om vores klæbemidler

Convatecs patenterede klæbemidler er integreret i alle vores stomi hudplader. Vores hydrokolloid klæbemidler er designet til brug i miljøer med høj fugtighed og har årtiers dokumenteret produktion.

De to diagrammer nedenfor hjælper med at bestemme hvilket klæbemiddel der kan være bedst for din patient.

Vores formuleringer er baseret på:

- ✓ Over fire årtier med bevist og betroet stomilosninger
- ✓ Forende klæbeteknologi, formuleret efter 15 års research og med over 400 formuleringer
- ✓ Uovertruffen support designet til at forbedre livet med en stomi

EN VEJLEDNING TIL hudplader

Hudpladen er det stykke af stomisystemet, der klæber til kroppen. Den bør sidde tæt omkring stomien for at forhindre lækage, og har en åbning tilpasset stomistorrelse og -form.



Modellérbar

ConvaTec Moldable Technology™ hudplade med Rebounding Memory Technology™ skaber en elastisklignende tætning, der passer til de fleste former og størrelser. "Rullekrave-effekten" laves opad stomien for at forbedre tætningen og beskytte huden.⁵

Anbefales til personer:

- ✓ der har store, runde, ovale eller uregelmæssigt formede stomier
- ✓ eller uregelmæssigt formede stomier med fingerfærdighedsproblemer, der finder opklipning udfordrende



Opklipbar

Opklipbare hudplader kan opklippes til at matche individuelle former og størrelser af stomier. Ved hjælp af en saks kan man klippe en cirkel, oval eller enhver form, der er nødvendig for at passe til stomien.

Anbefales til personer:

- ✓ med en stomistorrelse imellem forudstansede størrelser
- ✓ med en uregelmæssig stomiform




Forudstanset

Forudstansede hudplader har et cirkulært stomihul og er klar til anvendelse lige ud af kassen. De findes for de mest almindelige stomistorrelser.

Anbefales til personer:

- ✓ med en jævnt rund stomi, der passer til den tilgængelige forudstansede størrelse
- ✓ med fingerfærdighedsproblemer, der finder opklipning udfordrende

MODELLÉRBARE hudplader

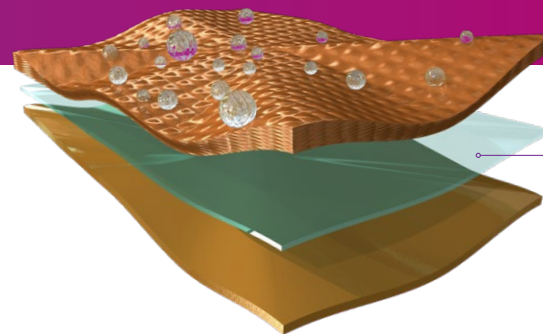

Convatecs unikke modellérbare teknologi består af Tri-laminat beskyttelse

Convatec Moldable Technology™ er den **LEDENDE MODELLÉRBARE HUDPLADE**, som nye patienter forlader hospitalet med⁶. Hudpladen er designet til at kramme stomien for en mere tilpasset og sikker pasform.

97 % er meget enige i, at det er nemmere at anvende modellérbar end opklipbar⁷

100 % er meget enige i, at det er hurtigere at påsætte modellérbar end opklipbar⁷

KLINISK BEVIST at forebygge og forbedre peristomale hudkomplikationer⁵


Op til 55 % af personer med stomi har hudproblemer⁸

95 % af de personer, der startede på Convatec Moldable Technology™ holdt deres hud sund⁵


86 % af personer, der skiftede til Convatec Moldable Technology™ forbedrede deres hudtilstand⁵



LEAK-LOCK™
Systemet, der er det første af sin slags, giver en tæt "rullekrave-effekt" for maksimal lækagekontrol og øget sikkerhed

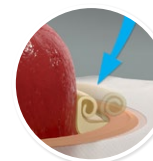

Patenteret REBOUNING MEMORY TECHNOLOGY™
Kan tilpasses, så den former sig til stomien for en perfekt pasform hver gang

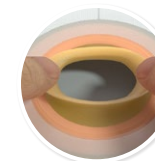

BLIVER PÅ
Rul, form og hold til stomiens form og størrelse. Hudpladerne er forstærket med vores roste klæbemidler, for at gøre det sikkert og give dine patienter ro i sindet

LØFTBAR FLANGE hudplader

Den løftbare flange er en mulighed på en række af Natura® hudpladerne. Den løftbare flange løftes for at give god plads til fingrene, så posekoblingen er nem og behagelig.



FORMÅLET MED konveksitet



Funktioner

Anbefales til personer:

- ✓ 2 gange mere fingerplads end nogen anden løftbar flange⁹
- ✓ Nem at måle og klippe eller modellere
- ✓ Udvalg af flade, konvekse, opklipbare og modellérbare muligheder
- ✓ Kompatibel med Natura™+ poser
- ✓ med fingerfærdighedsproblemer, da det giver fingerum, så posekoblingen er nem og behagelig
- ✓ designet til at forhindre pres eller traumer, hvis postoperativ abdominal omhed er til stede

Hvordan det fungerer

- ✓ Designet til at hjælpe med at minimere abdominalt tryk og smerte ved påsætning af posen.
- ✓ Kobles med et horbart 'klik' og fysisk 'snap' for at bekræfte posen sidder godt fast.



Loft flangen "op", så posen nemt kan påsættes uden at skulle trykke ind på kroppen.



Lav profil i "ned-positionen", så den ikke er synlig under tøjet.

Hvad er konveksitet?

Alle kroppe er forskellige. Konvekse hudplader er designet til at hjælpe med at håndtere uregelmæssige stomier og maver for at hjælpe med at reducere lækage og forenkle stomibandageringen

- ✓ Konveksitet er den udadgående krumning af hudpladen^{10,11}
- ✓ Konveksitet påfører et ensartet tryk på den peristomale hud, hvilket forbedrer fremspringet af stomien¹²
- ✓ Konveksitet hjælper med at opretholde en sikker kobling mellem posen og huden.¹³

Øget behov for konveksitet

Data viser behovet for konvekse hudplader vokser år for år.¹⁴ Dette skyldes et antal af faktorer, herunder:

- ✓ Ændring af kirurgiske teknikker/resultater af stomiform og profil
- ✓ Øget fedmefrekvens

Hvornår anvendes konveksitet?



Flush stomi
Beliggende på samme niveau som hudoverfladen, og stikker ikke ud¹⁵



Hudfolder
En stomi som ligger dybt i en hudfold/revne¹³



Tilbagetrukket stomi
Stomi trækker ind i maven under hudniveau eller har en lille eller ingen tud¹⁶



Blød eller slap abdomen
En mave, der kræver et fast niveau af støtte for at stabilisere posesystemet¹⁵

KARAKTERISTIKA VED konveksitet



Fasthed


Fast/stiv konveksitet

Anvendes typisk på bløde eller slappe maver.

Blød konveksitet


Anvendes typisk på faste eller tonede maver.

Dybde

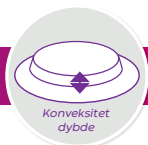

Plateaubredde

Afstand over den flade hævede overflade fra kant til kant

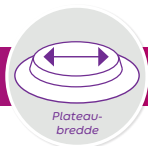


Hvorfor plateau bredde betyder noget

Succesfuld konveksitet skal presse ned på den peristomale hud nok til at give en god forsegling omkring bunden af stomien og hjælpe til fremspring.¹⁴

- ✓ **Konveksitetstryk:** En smal plateaubredde kan evt bruges til at skabe pres direkte omkring stomien med mindre tryk som plateauets bredde bliver bredere.
- ✓ **Plateaubredde:** En bredere plateaubredde kan bruges til at udjævne hudfolder omkring stomien.

GUIDE TIL PLATEAUBREDDE FOR ESTEEM™+ FLEX OG SOFT KONVEKS

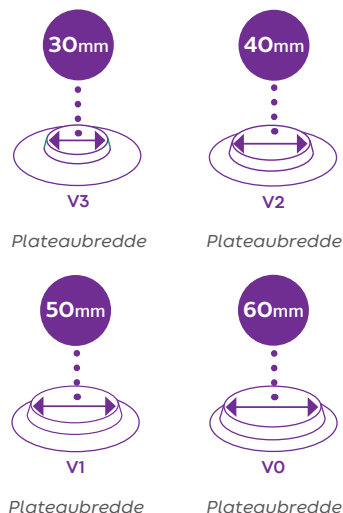

At vælge den rigtige konveksitets-løsning til forskellige kropsprofiler kan være udfordrende.

Du er velkommen til at rådføre dig med en af vores me+™-specialister, der også er sygeplejersker, for yderligere vejledning på tlf. 48 16 74 75

TYPER AF stomiposer

Convatec tilbyder et stort udvalg af stomiposer i både 2-dels og 1-dels stomisystemer



Lukket

En lukket pose kræver ikke tomning. Når posen er fuld, fjernes den blot og erstattes med en ny pose. Derudover er den lukkede pose ideel under fysisk aktivitet, intime øjeblikke, svømning og rejser

Anbefales til personer:

- ✓ der har fast, formet afforing der er forudsigtelig (1-2 gange om dagen)

Tombare

Tombare poser giver mulighed for at dræne outputtet med jævne mellemrum i løbet af dagen, så der ikke skal skiftes pose så ofte.

Anbefales til personer:

- ✓ som har løs, flydende afforing eller semi-formet afforing, der kan være uforudsigelig eller konstant i løbet af dagen

Urostomi

En urostomipose har en blod tap eller drejeventil i bunden, der giver mulighed for at dræne urin så ofte som nødvendigt.

Anbefales til personer:

- ✓ med en urostomi



FARVEN PÅ POSEN

Gennemsigtig (klar forside af posen)

Klar posefront til nem outputvurdering og bestemmelse af hvornår en pose skal skiftes eller tommes. Blodt og støjsvagt materiale på kropssiden af posen.

Uigennemsigtig (Beigefarvet pose)

Blodt og støjsvagt materiale dækker både front og kropssiden af posen for mere diskretion og komfort



Easy-View vindue

Nogle posemuligheder kommer med et vindue for nøjagtig positionering og observation af posen.



FILTER eller IKKE FILTER

Filtre hjælper med at frigive og deodorisere gas og holde den lukkede eller tommare pose flad. Bemærk at filteret skal dækkes med et filtercover under svømning, badning eller brusebad.

LUKNING PÅ TOMBAR POSE



InvisiClose™

Tombar integreret poselukning som giver en nem lukningsmulighed, der ikke kræver ikke en separat clips for ekstra sikkerhed.



Lock-it Pocket™

Vrangen foldes ud for at skjule den sikrede tommare lukning - giver fleksibilitet til en tommare pose, med følelsen og komforten af en lukket pose.



LUKNING PÅ UROSTOMIPOSE

Accuseal™-hanen med ventil er en drejeventil designet til nem manipulation og tømming. Andre dræneringsmuligheder omfatter en Soft Tap.

Alle urostomiposer inkluderer en anti-refluktventil som er designet til at hjælpe med at forhindre tilbageløb.

Esteem™ + 1-dels bandager

		Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	Esteem™ + 1-dels lukket pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, lille	421816	Stomahesive®	250	20-70 mm	Opklipbar	Beige	Ja	–	30
		421817	Stomahesive®	250	25	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421818	Stomahesive®	250	30	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421819	Stomahesive®	250	35	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421820	Stomahesive®	250	40	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
	Esteem™ + 1-dels lukket pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, standard, vindue	421686	Stomahesive®	500	20-70 mm	Opklipbar	Beige	Ja	–	30
		421687	Stomahesive®	500	25 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421688	Stomahesive®	500	30 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421689	Stomahesive®	500	35 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421822	Stomahesive®	500	40 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421823	Stomahesive®	500	50 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421824	Stomahesive®	500	60 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
	Esteem™ + 1-dels lukket pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, stor, vindue	421825	Stomahesive®	660	20-70 mm	Opklipbar	Beige	Ja	–	30
		421826	Stomahesive®	660	25 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421827	Stomahesive®	660	30 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421828	Stomahesive®	660	35 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421829	Stomahesive®	660	40 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421830	Stomahesive®	660	50 mm	Forudstanset	Beige	Ja	–	30
		421831	Stomahesive®	660	20-70 mm	Opklipbar	Klar	Ja	–	30
	Esteem™ + 1-dels modellérbar lukket pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, standard	413509	Stomahesive®	400	20-30	Modellérbar	Beige	Ja	–	30
		413510	Stomahesive®	400	30-40	Modellérbar	Beige	Ja	–	30
		413511	Stomahesive®	400	40-50	Modellérbar	Beige	Ja	–	30
	Esteem™ + 1-dels modellérbar tombar pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, standard	413521	Stomahesive®	550	20-30	Modellérbar	Beige	Ja	–	10
		413522	Stomahesive®	550	30-40	Modellérbar	Beige	Ja	–	10
		413523	Stomahesive®	550	40-50	Modellérbar	Beige	Ja	–	10
		413515	Stomahesive®	550	20-30	Modellérbar	Klar	Ja	–	10
		413517	Stomahesive®	550	40-50	Modellérbar	Klar	Ja	–	10

Esteem™ + 1-dels bandager

		Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	Esteem™ + 1-dels tombar pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, standard, vindue	421858	Stomahesive®	570	20-70	Opklipbar	Beige	Ja	-	10
		421859	Stomahesive®	570	25	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421860	Stomahesive®	570	30	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421861	Stomahesive®	570	35	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421862	Stomahesive®	570	40	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
	Esteem™ + 1-dels tombar med lukkeklemme, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, standard	421837	Stomahesive®	480	20-70	Opklipbar	Beige	Ja	-	10
		421843	Stomahesive®	480	25	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421844	Stomahesive®	480	30	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421845	Stomahesive®	480	35	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421846	Stomahesive®	480	40	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
	Esteem™ + 1-dels tombar pose, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, med konveks, standard.	416739	Durahesive®	550	19	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		416741	Durahesive®	550	22	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		416743	Durahesive®	550	25	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		416745	Durahesive®	550	28	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		416747	Durahesive®	550	32	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		416749	Durahesive®	550	35	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		416751	Durahesive®	550	38	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 5	10
		Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	Esteem™ + 1-dels tombar med lukkeklemme, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, stor	421838	Stomahesive®	713	20-70	Opklipbar	Beige	Ja	-	10
		421847	Stomahesive®	713	20-70	Opklipbar	Klar	Ja	-	10
		421839	Stomahesive®	713	25	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421840	Stomahesive®	713	30	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421841	Stomahesive®	713	35	Forudstanset	Beige	Ja	-	10
		421842	Stomahesive®	713	40	Forudstanset	Beige	Ja	-	10

Esteem™+ 1-dels Urostomi

	Esteem™+ 1-dels urostomiposer	Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Farve	Basisplade, hultype	Integreret lukning	Antal/ æske
	Med Stomahesive® pektinbaseret hudbeskyttelsesplade, standard	401233	Stomahesive®	600	13-45	Beige	Opklipbar	Bøjeligt aftapningsrør	10
		401237	Stomahesive®	600	20	Beige	Forudstanset	Bøjeligt aftapningsrør	10
		401241	Stomahesive®	600	25	Beige	Forudstanset	Bøjeligt aftapningsrør	10
		401245	Stomahesive®	600	30	Beige	Forudstanset	Bøjeligt aftapningsrør	10
		401232	Stomahesive®	600	13-45	Klar	Opklipbar	Bøjeligt aftapningsrør	10

Esteem® Flex Konveks

	Esteem® Flex Konveks	Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	Plateau variant V0, lukket pose	422158	Hydrokolloid	500	20-55	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	30
	Plateau variant V1, lukket pose	421612	Hydrokolloid	500	20-43	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	30
	Plateau variant V2, lukket pose	421613	Hydrokolloid	500	20-35	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	30
	Plateau variant V3, lukket pose	421614	Hydrokolloid	500	20-25	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	30

Esteem® Flex Konveks

	Esteem® Flex Konveks	Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	Plateau variant V0, tombar pose	422159	Hydrokolloid	500	20-55	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, tombar pose	421615	Hydrokolloid	500	20-43	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V2, tombar pose	421619	Hydrokolloid	500	20-35	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V3, tombar pose	421622	Hydrokolloid	500	20-25	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, tombar pose	421616	Hydrokolloid	500	25	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V2, tombar pose	421620	Hydrokolloid	500	25	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, tombar pose	421617	Hydrokolloid	500	30	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V2, tombar pose	421621	Hydrokolloid	500	30	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, tombar pose	421618	Hydrokolloid	500	35	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, urostomi, tombar pose	421623	Hydrokolloid	500	10-43	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V2, urostomi, tombar pose	421626	Hydrokolloid	500	10-35	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V3, urostomi, tombar pose	421628	Hydrokolloid	500	10-25	Opklipbar	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, urostomi, tombar pose	421624	Hydrokolloid	500	15	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V2, urostomi, tombar pose	421627	Hydrokolloid	500	15	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V3, urostomi, tombar pose	421629	Hydrokolloid	500	15	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10
	Plateau variant V1, urostomi, tombar pose	421625	Hydrokolloid	500	20	Forudstanset	Beige	Ja	Ja, 7	10



Esteem® Soft Konveks

	Esteem® Soft Konveks	Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	Plateau variant V1, lukket pose	422360	Hydrokolloid	500	20-47	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	30
	Plateau variant V2, lukket pose	422361	Hydrokolloid	500	15-40	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	30
	Plateau variant V3, lukket pose	422362	Hydrokolloid	500	10-28	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	30
	Plateau variant V1, tombar pose	422363	Hydrokolloid	500	20-47	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	10
	Plateau variant V2 tombar pose	422364	Hydrokolloid	500	15-40	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	10
	Plateau variant V3, tombar pose	422365	Hydrokolloid	500	10-28	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	10
	Plateau variant V1, urostomi, tombar pose	422551	Hydrokolloid	500	20-47	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	10
	Plateau variant V2, urostomi, tombar pose	422557	Hydrokolloid	500	15-40	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	10
	Plateau variant V3, urostomi, tombar pose	422562	Hydrokolloid	500	10-28	Opklipbar	Beige	Ja	ja, 4	10

IleoDress Plus® | Stomadress®, 1-dels cap IriDress® 1-dels Irrigationbandage

	IleoDress Plus® Postoperativ	Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hulstype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	IleoDress Plus® 1-dels tombar pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, stor, usteril	650803	Stomahesive®	950	8-100	Opklipbar	Klar	–	–	10
	Stomadress®, 1-dels cap	Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Basisplade, hulstr. (mm.)	Basisplade, hulstype	Farve	Filter	Konveks/ mm	Antal/ æske
	StomaDress 1-dels lukket pose, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, mini	175611	Stomahesive®	40	19-50	Opklipbar	Beige	Ja	–	30
	Irrigationsbandager (skylleærmer)			Convatec varenr.	Koblingstype		Ringstørrelse (mm.)		Farve	Antal/ æske
	IriDress® 1-dels irrigationspose, med hydrokolloidklæber			175612	Opklipbar		50		Klar	10

Natura® 2-dels, hudbarrierer med ringkobling

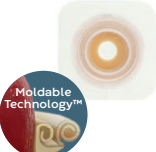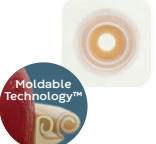	Natura® hudplader	Convatec varenr.	Klæbertype	Koblingstype	Basisplade, ringstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Konveks	Antal/ æske
	Natura®, Modellérbar, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant	411801	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	45/13-22	Modellérbar	–	10
		411803	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	45/22-33	Modellérbar	–	10
		411805	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/33-45	Modellérbar	–	10
		411807	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	70/45-56	Modellérbar	–	10
	Natura®, Modellérbar, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant	411800	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	45/13-22	Modellérbar	–	10
		411802	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	45/22-33	Modellérbar	–	10
		411804	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/33-45	Modellérbar	–	10
		411806	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	70/45-56	Modellérbar	–	10
	Natura®, Modellérbar, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant og løftbar ringkobling	421033	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/13-22	Modellérbar	–	10
		421034	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/22-33	Modellérbar	–	10
		421035	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	70/33-45	Modellérbar	–	10
	Natura®, Modellérbar, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant og løftbar ringkobling	421039	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/13-22	Modellérbar	–	10
		421040	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/22-33	Modellérbar	–	10
		421041	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	70/33-45	Modellérbar	–	10
	Natura®, Modellérbar, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant	404592	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/13-22	Modellérbar	Ja, 5mm	10
		404593	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/22-33	Modellérbar	Ja, 5mm	10
		404594	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57/33-45	Modellérbar	Ja, 5mm	10

Natura® 2-dels, hudbarrierer med ringkobling

	Natura® hudplader	Convatec varenr.	Klæbertype	Koblingstype	Basisplade, ringstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Konveks	Antal/ æske
	Natura®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid	401574	Stomahesive®	Ringkobling	38	Opklipbar	–	10
		401575	Stomahesive®	Ringkobling	45	Opklipbar	–	10
		401576	Stomahesive®	Ringkobling	57	Opklipbar	–	10
	Natura® Stomahesive® FLEXIBLE, pektinbaseret hydrokolloid	402219	Stomahesive®	Ringkobling	38	Opklipbar	–	10
		402220	Stomahesive®	Ringkobling	45	Opklipbar	–	10
		402221	Stomahesive®	Ringkobling	57	Opklipbar	–	10
	Natura®, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid	413154	Durahesive®	Ringkobling	38	Opklipbar	–	10
		413155	Durahesive®	Ringkobling	45	Opklipbar	–	10
		413156	Durahesive®	Ringkobling	57	Opklipbar	–	10
		413157	Durahesive®	Ringkobling	70	Opklipbar	–	10
	Natura®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid, med hydrokolloidkant	410294	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	38	Opklipbar	–	10
		410295	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	45	Opklipbar	–	10
		410296	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57	Opklipbar	–	10
		410297	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	70	Opklipbar	–	10
	Natura®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant	125263	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	38	Opklipbar	–	10
		125264	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45	Opklipbar	–	10
		125265	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57	Opklipbar	–	10
		125266	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	70	Opklipbar	–	10

Natura® 2-dels, hudbarrierer med ringkobling og løftbar flange

	Natura® hudplader	Convatec varenr.	Klæbertype	Koblingstype	Basisplade, ringstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Konveks	Antal/æske
	Natura®, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant og løftbar flange	421453	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45	Opklipbar	–	5
		421457	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57	Opklipbar	–	5
		421461	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	70	Opklipbar	–	5
	Natura®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant og løftbar flange	421455	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45	Opklipbar	–	5
		421459	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57	Opklipbar	–	5
		421463	Stomahesive®, akrylatkant	Ringkobling	70	Opklipbar	–	5
	Natura®, Konveks, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant og løftbar flange	421633	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	45/13-22	Opklipbar	Ja, 5mm	5
		421635	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	57/13-35	Opklipbar	Ja, 5mm	5
		421637	Durahesive®, hydrokolloidkant	Ringkobling	70/13-48	Opklipbar	Ja, 5mm	5

Natura® 2-dels, konvekse hudbarrierer med ringkobling

	Natura® hudplader	Convatec varenr.	Klæbertype	Koblingstype	Basisplade, ringstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Konveks	Antal/ æske
	Natura®, Konveks, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant	413177	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/13	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413178	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/16	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413179	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/19	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413180	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/22	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413181	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/25	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413182	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/28	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413183	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/32	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413184	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	45/35	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413185	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57/38	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413186	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57/41	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413187	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57/45	Forudstanset	Ja, 5mm	10
		413188	Durahesive®, akrylatkant	Ringkobling	57/50	Forudstanset	Ja, 5mm	10

Natura® + Lukkede poser

	Natura® + Kolostomiposer	Convatec varenr.	Volumen (ml.)	Koblingstype	Ringstr.	Farve	Antal/æske	Filter	Bælte-orer
	Natura® + 2-dels lukket pose, lille, vindue	421795	250	Ringkobling	38	Beige	30	Ja	Ja
		421796	250	Ringkobling	45	Beige	30	Ja	Ja
		421797	250	Ringkobling	57	Beige	30	Ja	Ja
	Natura® + 2-dels lukket pose, standard, uden vindue	416403	500	Ringkobling	38	Beige	30	Ja	Ja
		416406	500	Ringkobling	45	Beige	30	Ja	Ja
		416409	500	Ringkobling	57	Beige	30	Ja	Ja
		416412	500	Ringkobling	70	Beige	30	Ja	Ja
	Natura® + 2-dels lukket pose, standard, vindue	421678	500	Ringkobling	38	Beige	30	Ja	Ja
		421680	500	Ringkobling	45	Beige	30	Ja	Ja
		421682	500	Ringkobling	57	Beige	30	Ja	Ja
		421798	500	Ringkobling	70	Beige	30	Ja	Ja
	Natura® + 2-dels lukket pose, stor, vindue	421799	660	Ringkobling	38	Beige	30	Ja	Ja
		421800	660	Ringkobling	45	Beige	30	Ja	Ja
		421801	660	Ringkobling	57	Beige	30	Ja	Ja
		421802	660	Ringkobling	70	Beige	30	Ja	Ja

Natura® + Tømbare poser

	Natura® + Ileostomiposer	Convatec varenr.	Volumen (ml.)	Koblingstype	Ringstr.	Farve	Antal/ æske	Filter	Bælte-orer
	Natura® + 2-dels tømbar pose, standard med InvisiClose®	416415	570	Ringkobling	38	Beige	10	Ja	Ja
		416416	570	Ringkobling	45	Klar	10	Ja	Ja
		416417	570	Ringkobling	45	Beige	10	Ja	Ja
		416420	570	Ringkobling	57	Beige	10	Ja	Ja
		416423	570	Ringkobling	70	Beige	10	Ja	Ja
	Natura® + 2-dels tømbar pose, standard, vindue, med InvisiClose®	421746	570	Ringkobling	38	Beige	10	Ja	Ja
		421747	570	Ringkobling	45	Beige	10	Ja	Ja
		421748	570	Ringkobling	57	Beige	10	Ja	Ja
		421749	570	Ringkobling	70	Beige	10	Ja	Ja
	Natura® 2-dels tømbar pose, lille, med lukkeklemme	125916	300	Ringkobling	38	Beige	10	-	Ja
		125917	300	Ringkobling	45	Beige	10	-	Ja
		125918	300	Ringkobling	57	Beige	10	-	Ja
	Natura® + 2-dels tømbar pose, standard, med lukkeklemme	125926	500	Ringkobling	38	Beige	10	-	Ja
		125927	500	Ringkobling	45	Beige	10	-	Ja
		125928	500	Ringkobling	57	Beige	10	-	Ja
		125929	500	Ringkobling	70	Beige	10	-	Ja
	Natura® + high output stomipose, ekstra large med lukketap	404137	840	Ringkobling	45	Beige	5	Ja, udskifteligt	Ja
		404138	840	Ringkobling	57	Beige	5	Ja, udskifteligt	Ja
		404139	840	Ringkobling	70	Beige	5	Ja, udskifteligt	Ja

Natura® Urostomiposer


	Natura® + Urostomiposer	Convatec varenr.	Volumen (ml.)	Koblingstype	Ringstr.	Farve	Antal/ æske	Filter	Bælteører
	Natura® 2-dels urostomipose, standard. konnektor til nat-/benposer medfølger Med Accuseal™ drejeventil	401552	600	Ringkobling	38	Beige	10	–	Ja
		401553	600	Ringkobling	45	Beige	10	–	Ja
		401554	600	Ringkobling	57	Beige	10	–	Ja
		401544	600	Ringkobling	45	Klar	10	–	Ja
		401545	600	Ringkobling	57	Klar	10	–	Ja
	Natura® 2-dels urostomipose med bøjet aftapningsrør, Standard	401540	600	Ringkobling	45	Klar	10	–	Ja
	Natura® 2-dels urostomipose, small	421079	400	Ringkobling	45	Klar	30	–	Ja
	Natura® 2-dels urostomipose, standard	420457	600	Ringkobling	45	Klar	30	–	Ja
		420460	600	Ringkobling	57	Klar	30	–	Ja
		420462	600	Ringkobling	70	Klar	30	–	Ja




Esteem Synergy® 2-dels løsninger

Esteem Synergy®+ består af hudplader og poser, der kobles sammen med klæbe-teknologien, Adhesive Coupling Technology™.

Her sættes posen og hudpladen sammen ved hjælp af en klæbende ring og en "landingszone", hvorved man fjerner behovet for de stive koblingsringe af plastik, som man finder i traditionelle 2-delssystemer. Denne koblingsmekanisme af skum er mere fleksibel end de traditionelle systemer og har en lavere profil under tøjet.

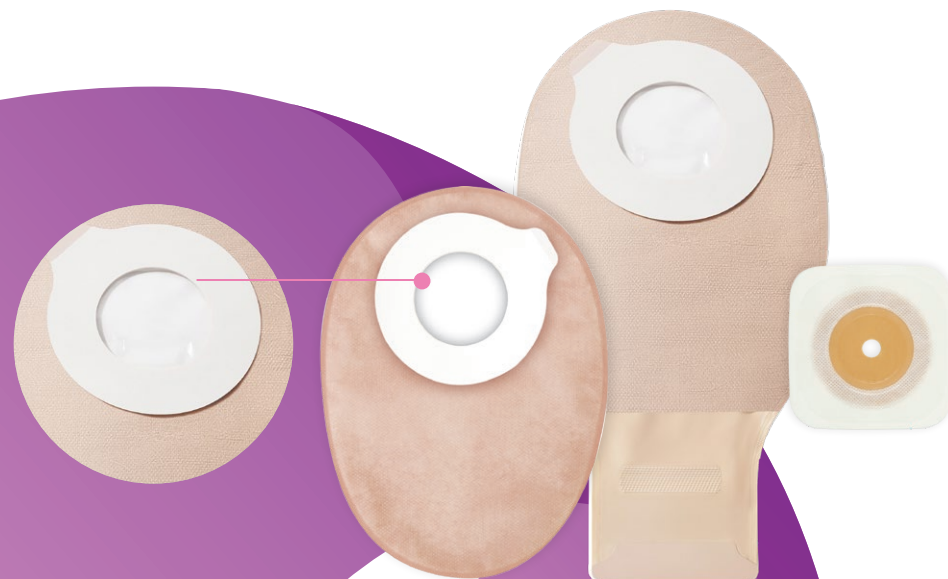

Esteem Synergy® 2-dels, hudbarrierer med klæbekobling

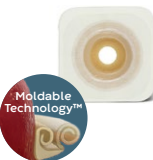	Esteem Synergy® Hudplader	Convatec varenr.	Klæbertype	Koblingstype	Basisplade, ringstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Konveks	Antal/æske
	Esteem Synergy®, Modellérbar, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant	411657	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	48/13-22	Modellérbar	–	10
		411658	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	48/22-33	Modellérbar	–	10
		411659	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	61/33-45	Modellérbar	–	10
	Esteem Synergy®, Konveks, Modellérbar, Durahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant	409268	Durahesive®, akrylatkant	Klæbekobling	35/13-22	Modellerbar	Ja	10
		409269	Durahesive®, akrylatkant	Klæbekobling	48/22-33	Modellerbar	Ja	10
		409270	Durahesive®, akrylatkant	Klæbekobling	61/33-45	Modellerbar	Ja	10
	Esteem Synergy®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid	405468	Stomahesive®	Klæbekobling	48/13-48	Opklipbar	–	10
		403948	Stomahesive®	Klæbekobling	61/13-61	Opklipbar	–	10
	Esteem Synergy®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant	409288	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	35/13-35	Opklipbar	–	10
		409289	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	48/13-48	Opklipbar	–	10
		409290	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	61/13-61	Opklipbar	–	10
	Esteem Synergy®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med akrylatkant	405456	Stomahesive®, akrylatkant	Klæbekobling	35/13-35	Opklipbar	–	10
		405457	Stomahesive®, akrylatkant	Klæbekobling	48/13-48	Opklipbar	–	10
		405458	Stomahesive®, akrylatkant	Klæbekobling	61/13-61	Opklipbar	–	10

Esteem Synergy® 2-dels, hudbarrierer med klæbekobling. Lokkede og tømbarer poser med klæbekobling.

	Esteem Synergy® Hudplader	Convatec varenr.	Klæbertype	Koblingstype	Basisplade, ringstr. (mm.)	Basisplade, hultype	Konveks	Antal/æske
	Esteem Synergy®, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant	403965	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	35/22	Forudstanset	–	10
		403966	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	35/25	Forudstanset	–	10
		403967	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	35/28	Forudstanset	–	10
		403968	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	35/32	Forudstanset	–	10
		403969	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	35/35	Forudstanset	–	10
		403970	Stomahesive®, hydrokolloidkant	Klæbekobling	48/38	Forudstanset	–	10

	Esteem Synergy® + poser	Convatec varenr.	Volumen (ml.)	Ringstr.	Koblingstype	Farve	Filter	Bælteører	Antal/æske
	Esteem Synergy®+ 2-dels lukket pose, small	416781	250	Klæbekobling	48	Beige	Ja	–	30
	Esteem Synergy®+ 2-dels lukket pose, standard	416775	400	Klæbekobling	35	Beige	Ja	–	30
		416779	400	Klæbekobling	48	Beige	Ja	–	30
		416783	400	Klæbekobling	61	Beige	Ja	–	30
	Esteem Synergy®+ 2-dels tømbar pose, standard	416796	550	Klæbekobling	35	Beige	Ja	–	10
		416799	550	Klæbekobling	48	Beige	Ja	–	10
		416902	550	Klæbekobling	61	Beige	Ja	–	10

Børnesortiment

1-dels bandager		Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Ringstr. (mm.)	Koblings-type	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Lukning	Antal/ æske
	Little Ones™ 1-dels tombar pose, Stomahesive®, pektin-baseret hydrokolloid	411633	Stomahesive®	56	0-23	–	Opklipbar	Klar/ Beige	–	InvisiClose®	10
2-dels hudbeskyttelsesplader med ACT klæbekobling		Convatec varenr.	Klæbertype	Volumen (ml.)	Ringstr. (mm.)	Koblings-type	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Integreret lukning	Antal/ æske
	Little Ones™, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid	411632	Stomahesive®	–	0-23	Klæbe-kobling	Opklipbar	–	–	–	5
	Little Ones™, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid	411641	Stomahesive®	–	4,8-31	Klæbe-kobling	Opklipbar	–	–	–	5
	Little Ones™, Stomahesive®, pektinbaseret hydrokolloid med hydrokolloidkant	411642	Stomahesive® Flexible, hydrokolloidkant	–	4,8-31	Klæbe-kobling	Opklipbar	–	–	–	5
2-dels poser til hudplader med ACT klæbekobling		Convatec varenr.	Volumen (ml.)		Ringstr. (mm.)	Koblingstype	Basisplade, hultype	Farve	Filter	Integreret lukning	Antal/ æske
	Little Ones™, 2-dels pose tombar	411631	56		0-23	Klæbekobling	Opklipbar	Klar	–	InvisiClose®	10
		411638	200		31	Klæbekobling	Forudstanset	Beige	Ja	InvisiClose®	10
		411637	200		31	Klæbekobling	Forudstanset	Klar	Ja	InvisiClose®	10

Tilbehør



Klæbefjerner	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
ESENTA™ klæbefjerner, servietter	423281		3 ml	100% silikone	30
ESENTA™ klæbefjerner, spray	423289		50 ml	100% silikone	1
ESENTA™ klæbefjerner, spray, steril	423290		150 ml	100% silikone	

Hudbeskyttelsesfilm	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
ESENTA™ hudbeskyttelse, servietter	423282	–	3 ml	Silikonebaseret	30
ESENTA™ hudbeskyttelse, spray	423288	–	50 ml	Silikonebaseret	1
ESENTA™ hudbeskyttelse, pumpespray	423286	–	28 ml	Silikonebaseret	1
ESENTA™ hudbeskyttelse, skumapplikatorpind, steril	423283	–	1 ml	Silikonebaseret	5
ESENTA™ hudbeskyttelse, skumapplikatorpind, steril	423284	–	1 ml	Silikonebaseret	25
ESENTA™ hudbeskyttelse, skumapplikatorpind, steril	423287	–	3 ml	Silikonebaseret	5
ESENTA™ hudbeskyttelse, skumapplikatorpind, steril	423285		3 ml	Silikonebaseret	25

Kantsikring	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
ease™ kantsikring, tynd, hydrokolloid	422160	–	3 x 11 cm	Hydrokolloid	60
ease™ kantsikring, tynd, buet, hydrokolloid	422164	–	3 x 9 cm	Hydrokolloid	60

Lugtkontrol og fortykningsmiddel	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
Diamonds, gelerende og lugtabsorberende portionsposer	TR 105	–	Portionspose	–	100

Tilbehør



Hudbeskyttelsesprodukter, produkter til ekstra tætning og udjævning	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
Stomahesive® plader, pektinbaseret hydrokolloid	21713	–	10 x 10 cm	Stomahesive®	5
Stomahesive® pasta, med alkohol, pektinbaseret hydrokolloid	183910	–	60 g	Stomahesive®	1
Stomahesive® stropulver, pektinbaseret hydrokolloid	25535	–	25 g	Stomahesive®	1
Urihesive® strimmel, pektinbaseret hydrokolloid	173915	–	1.5 x 12 cm	Stomahesive®	15
Stomahesive® Seal tætningsringe	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
Stomahesive® Seal tætningsring, pektinbaseret hydrokolloid	413503	48	4 mm	Stomahesive®	10
Stomahesive® Seal tætningsring, pektinbaseret hydrokolloid, thin	413504	48	3 mm	Stomahesive®	10
Poselukning	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
Buet lukkeklemme, beige	175652	–	0,9x8 cm	–	10
Blød clips, hvid	175633	–	0,9x13 cm	–	50
Stomibælte	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
Bælte	175507	–	50-106 cm	–	1

Tilbehør

Convatec Transversostomistav	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
Transversostomistav, steril	22355	–	65 mm	–	10
Transversostomistav, steril	22356	–	90 mm	–	10

Skumbandage med sårkontaktlag af hydrofiber	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
AQUACEL® Foam uden klæber	420631	–	5 x 5 cm	Hydrofiber®	10
AQUACEL® Foam uden klæber	420633	–	10 x 10 cm	Hydrofiber®	10
AQUACEL® Foam med klæber	420804	–	8 x 8 cm	Hydrofiber®/ silikoneklæber	10
AQUACEL® Foam med klæber	420680	–	10 x 10 cm	Hydrofiber®/ silikoneklæber	10
AQUACEL® Foam med klæber	420619	–	12,5 x 12,5 cm	Hydrofiber®/ silikoneklæber	10

Hydrofiberbandage med sølv og biofilm-reducerende faktor	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
AQUACEL® Ag+ Ekstra bandage	413566		5x5	Hydrofiber®/ Ag+ teknologi	10

Hydrokolloid bandager	Convatec varenr.	Ringstr. (mm.)	Størrelse/mængde	Bemærkning	Antal/æske
DuoDERM® E	187658	–	10 x 10 cm	Hydrokolloid	20
DuoDERM® Extra Thin	187954	–	10 x 10 cm	Hydrokolloid	5



EN SUND
RELATION
HVER DAG,
HVOR SOM
HELST.

ESENTA™



**SILIKONEBASERET
HUDBESKYTTELSE**



**SILIKONEBASERET
KLÆBEFJERNER**



Referencer

1. Bulkeley, J.E., McMullen, C.K., Grant, M., Wendel, C., Hornbrook, M.C. Krouse, R.S. (2018). Ongoing Ostomy Self-Care Challenges of Long-Term Rectal Cancer Survivors. *Supportive Care in Cancer*, 26 (11), 3933-3939.
2. Consumer survey following me+ nurse consultation, N=166, ConvaTec, Data on File.
3. Consumer survey following telehealth nurse consultation, ConvaTec & Corstrata, 2020, data on file.
4. ConvaTec Internal in vitro lab testing. OCT 0112
5. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna Majewska, RN, ETN; Mary V. Cabral, MS, FNP-BC, CWCN-AP; and Karin Hölzel-Piontek, RN; The Effects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Persons with an Ostomy: Results of a Prospective, Observational, Multinational Study, *Ostomy Wound Management* 2014;60(12):16-26.
6. ConvaTec Q2 2021 NPC US Markettrack Report.
7. Consumer sampling survey, N=34, ConvaTec, 2021, data on file.
8. Bosio G., Pisani F., Lucibello, L. A Proposal for Classifying Peristomal Skin Disorders: Results of a Multicenter Observational Study. *OWM*. 2007; 53(9): 38-43.
9. Clinical Evaluation of Sur Fit Natura Cut to Fit Skin Wafers Gillian Seaton. Technical data on file, reference document WHRI3940 TA238 2014.
10. Rolstad, BS. Principles and techniques in the use of convexity. *Ostomy Wound Manage*. 1996. 42(1); 24-32.
11. Pontieri, Lewis V. Basics of ostomy care. *Medsurg Nurs*. 2006; 15(4): 199-202.
12. Hanley, J. Convex stoma appliances: are we getting it right? *British Journal of Nursing (Stoma Supplement)*. 2013; 22(16).
13. Turnbull, GB. The convexity controversy. *Ostomy Wound Manage*. 2003; 49(1): 16-www.o-wm.com/article/1203. Accessed 29 Feb, 2016.
14. DRG data 2015, in T5 markets: Japan, UK, USA, Germany, China .
15. Boyd, K. Clinical Protocols for Stoma Care - Use of convex appliances. *Nursing Standard*. 2004; 18(20): 37-38.
16. Burch, 2011: Management of Stoma Complications. *NursingTimes.net*. 10 Nov 2011.
17. Voegeli D. LBF® "No-Sting" Barrier Wipes: Skin Care Using Advanced Silicone Technology. *British Journal of Nursing*, 2008; Vol. 17: No. 7



Fáðu sýnishorn hjá MEDOR sem passa þér
medor@medor.is
www.medor.is

Pantanir: netspjall á www.distica.is eða
vefverslun Distica.
sala@distica.is

Følg Convatec Danmark på



Fylgdu MEDOR á facebook.

Convatec Danmark A/S
Østmarken 3A, 2860 Soborg.
Tlf. 48 16 74 75

www.convatec.dk · convatec.danmark@convatec.com