


mylife™ Clickfine® DiamondTip meira þægindi með fullkomnum oddi

Mýkri stunga – þökk sé nýrri hönnun og nákvæmni mylife™ Clickfine® fæst í öllum apótekum

- 6- fláa oddur, gefur betri stungu
- Þynnri veggur, auðveldar inngjöf lyfsins
- Heyranlegt “Click” staðfestir að nálin er á réttum stað
- Sérstök sílikon húðun til að hámarka þægindi við stungu
- Hentar á alla helstu insúlínpenna¹
- Fáanlegt í 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm lengdum

DIAMOND TIP

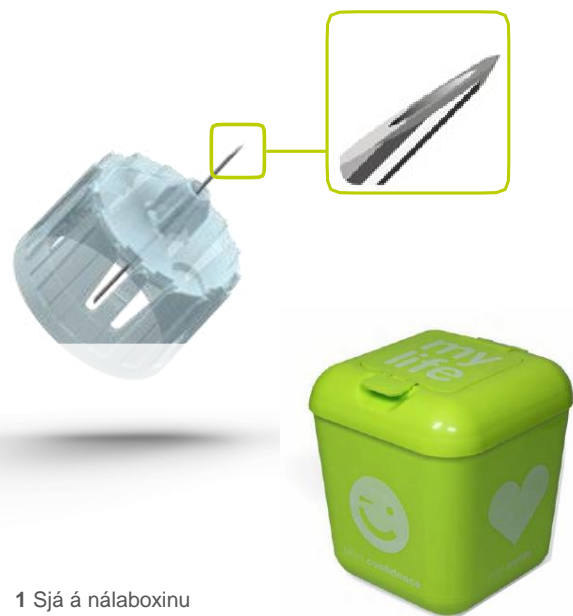

1 Sjá á nálaboxinu



my life Sharpscontainer

Einnota sterilar öryggis lansettur fyrir öryggið og þægindi í hefðbundnum blóðtökum


- Enginn hættu á stunguslysum eftir notkun, þökk sé einnota sleppibúnaði
- Öryggishettan, hindrar mengun og sýnir hvort öryggis lansettan sé ný eða notuð
- Hágæða lansettur með „þriggja fláa oddi“ sem skilar ákjósanlegu blóðflæði með hámarksþægindum




Þægileg og örugg inngjöf
Rétt lengd á nál

Insúlín er sprautað í fituvef undir húð

Spautun á insúlíni í vöðva getur orskakað alvarlegt blóðsykurfall

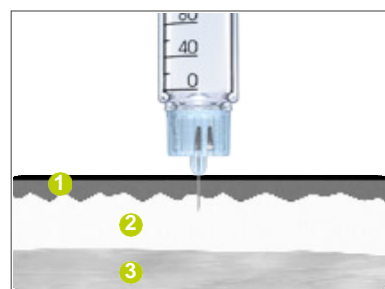


✓ Insúlín sprautað í fituvef undir húð

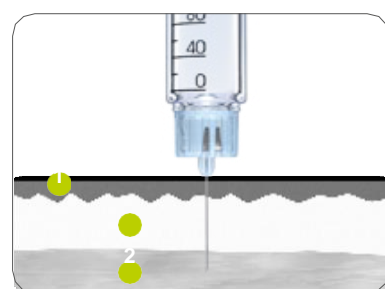



✗ Ekki sprauta insúlíni beint í vöðva

- Húð
- Fituvefur undir húð
- Vöðvi

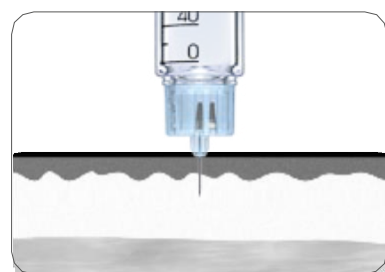

Fyrir 4 mm og 5 mm nála lengd


Haltu þennanum með nálinni í 90 gráður frá húðinni þannig að hún sé bein, án þess að búa til húðfellingu (fyrir börn, unglinga eða mjög grannan einstakling, gæti verið nauðsynlegt að gera húðfellingu þegar verið er að sprauta í lærið).

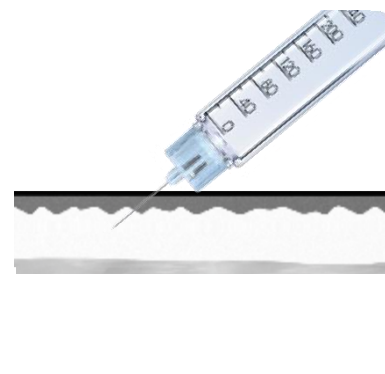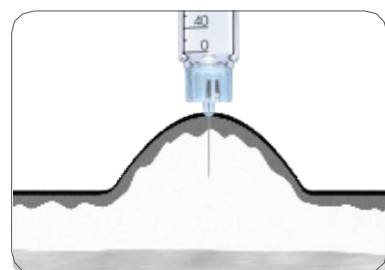

Fyrir 6 mm og 8 mm nála lengd

Inngjöf með húðfellingu þá er nálín í 90 gráður á húðina eða án húðfellingar þá er hún látin vera í 45 gráður á húðina.

Hentugir stungustaðir
Insúlín það frásogast ekki á sama hraða frá öllum stöðum


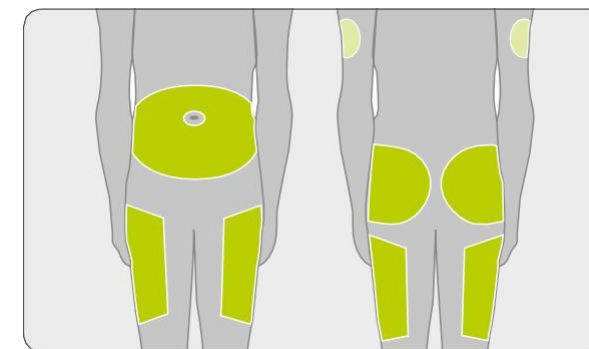


Kviðurinn: Insúlín frásogast hratt

Læri: Insúlín frásogast hægt


Rasskinnar og aftan á lærum:

Insúlín frásogast hægt

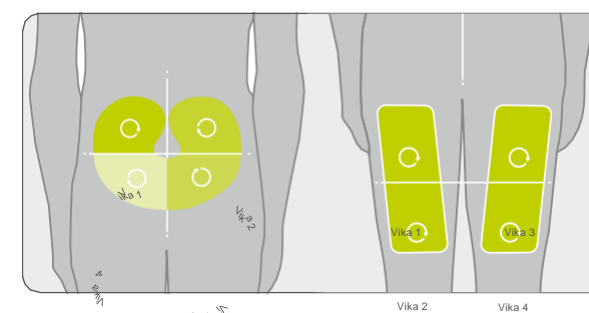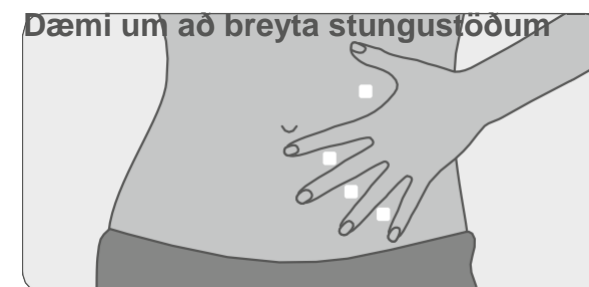

Einnota insúlín nálar
Hættan á að nota nálarnar of oft

- Nálin er nokkuð slétt eftir fyrstu notkun, en það sem smyr hana gæti verið farið af og sýnt merki um slit nálín tapar lagi sínu
- Nálin er ekki lengur sótthreinsuð eftir fyrstu notkun
- Insúlínið getur kristallast í nálinni
- Loftbólur gætu myndast í nálinni

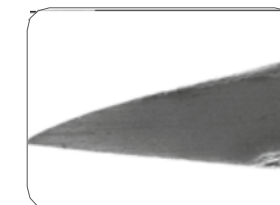

Ný nál



Margnota nál



Ráð fyrir insúlín inngjöf

- Notið nýja nál í hvert sinn
- Fyrir fyrstu notkun – gerið forpróf á þennanum
- Eftir inngjöf, skal halda nálinni inni og telja hægt upp að 10 áður en hún er tekin út